

## Agujas Hipodérmicas Estériles Descartable

### Descripción :

- Aguja hipodérmica estéril descartable está destinada a inyectar o extraer fluidos principalmente del cuerpo humano.
- El producto se fabrica con PP médico y acero inoxidable austenítico, de conformidad con la norma ISO 7864:2016
- La estructura de la aguja hipodérmica estéril descartable consta de:  
1. Tapa protectora de la aguja 2. cánula de la aguja 3. cubo de la aguja. Los productos son estériles y libres de pirógenos, y se esterilizan con EO.
- Las agujas son compatibles con todos los tipos de jeringa convencionales con conexión luer o luer-lock.
- Aplicaciones de las Aguja Hipodérmica: Ideales para una diversidad de usos clínicos y terapéuticos: Terapias intravenosas e intramusculares, Inyecciones subcutáneas, Procedimientos médicos generales.
- El calibre o grosor de las agujas usadas en medicina se mide en gauge, es una escala inversa, luego la aguja da su longitud (mm).



### Modo de Uso

- Rompa el envase individual, saque la jeringa de insulina y coja la aguja con el dedo o con unas pinzas.
- Empuje el conector de la aguja hasta que quede bien fijado y retire la tapa protectora.
- Realice la inyección bajo la piel, el músculo o la vena.
- El producto es DESCARTABLE, deséchelo después de su uso, está prohibido reutilizarlo o darle otro uso.
- Compruebe la integridad del envase del producto antes de utilizarlo. No lo utilice si el envase individual está roto, la tapa protectora fue retirada o se encuentra algún cuerpo extraño en su interior, ya que podría provocar efectos negativos graves.
- El operador deberá desinfectar la herida si se corta accidentalmente la piel al utilizar el producto.
- Fecha de caducidad y condiciones de almacenamiento
- La fecha de caducidad es de 5 años a partir de la fecha de fabricación. El producto debe utilizarse antes de la fecha de caducidad. El lote del producto y la fecha de caducidad están indicados en el sello del envase individual.

Producto Marca:



Ficha Técnica **propiedad de Gaesca, "Gasas Esterilizadas C.A."** Prohibida su reproducción total o parcial, sin consentimiento de la empresa.

## Agujas Hipodérmicas Estériles de un Solo Uso

### Medidas :

- 30G x 1/2"
- 27G x 1/2"
- 26 x 1 1/2"
- 25G x 5/8"
- 23G x 1", 23 x 1 1/2"
- 22G x 1 ", 22 x 1 1/2", 22 x 1/4
- 21G x 1", 21 x 1 1/2"
- 20G x 1", 20 x 1 1/2",
- 19G x 1", 19 x 1 1/2"
- 18G x 1", 18 x 1 1/2"



### Presentación:

Producto	Presentación	Unidad de Venta	Código
AGUJA HIPODERMICA	Unidad	Caja x 100 Unidades	Según Medida

Producto Marca:



Ficha Técnica **propiedad de Gaesca, "Gasas Esterilizadas C.A."** Prohibida su reproducción total o parcial, sin consentimiento de la empresa.

+ 58 212 263.2828

info@gaesca.com

Av. Francisco de Miranda, Torre TFC, Piso 10, La Castellana 1060, Caracas - Venezuela.  
Rif. J-00267650-7

www.gaesca.com

@gaesca.vzla